


Arztinformation zur Liquid Biopsy

All-RAS Analytik (KRAS & NRAS)

zur verbesserten Versorgung von Patienten mit metastasiertem Darmkrebs

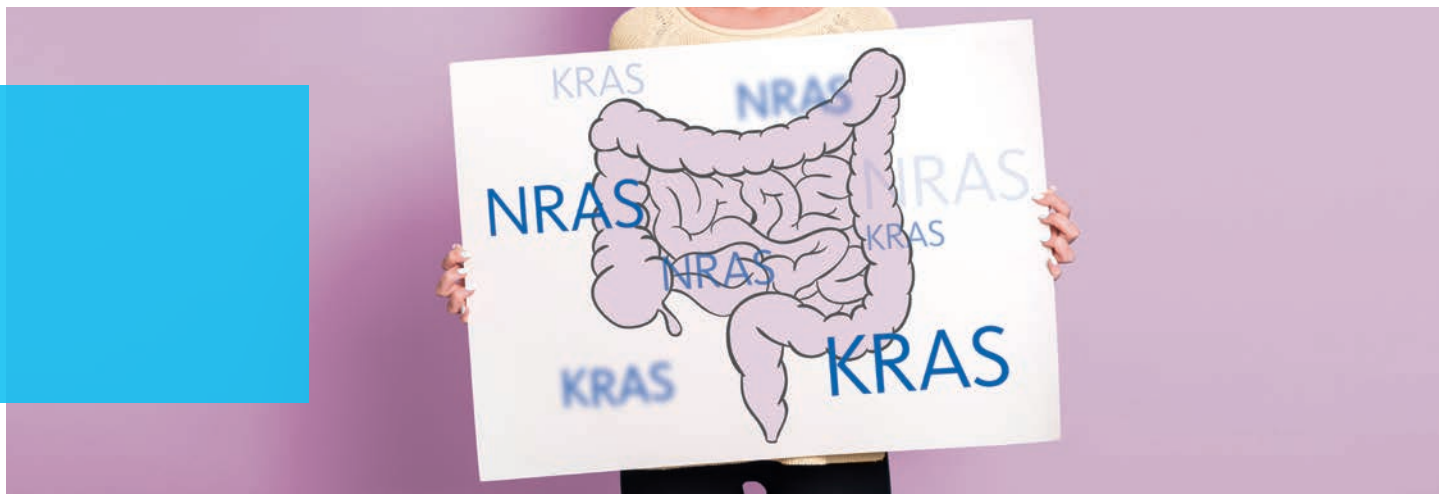

OncoBEAM RAS Analytik aus dem Blut

- Bestimmung von 34 klinisch relevanten RAS Mutationen (KRAS und NRAS) aus dem Blut
- Vermeidung von Gewebebiopsien
- Umfassendes und aktuelles Bild des gesamten Primärtumors und aller Metastasen
- Gleiche Überlebensraten aus der Blutdiagnostik im Vergleich zur Gewebediagnostik in der Erstlinie
- Schnelle, nicht invasive Diagnostik als Basis für die Therapieentscheidung
- Verbesserte Vorhersage von Therapieresistenzen

Senden Sie die Blutproben Ihrer Patienten
direkt in eines der OncoBEAM Liquid Biopsy
Kompetenzzentren in Deutschland ein

- Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum
- Med. Fakultät des Universitätsklinikums Mannheim

Weitere Informationen zu den Zentren finden Sie hier:
www.sysmex.de/exzellenzzentren

Für weitere Fragen
kontaktieren Sie:

Dr. Barbara Behrens

Sysmex Deutschland GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt

Mobil +49 172 910 20 77

Fax +49 40 534 102 61 69

behrens.barbara@sysmex.de

OncoBEAM RAS, Bestimmung des All-RAS Panels aus dem Blut

Testbestellung in drei Schritten

Schritt 1

Bestellung von speziellen Blutentnahmegefäßen und Versandboxen



Bestellen Sie kostenfrei über das beiliegende Bestellformular.
Faxen Sie es bitte ausgefüllt an +49 40 534102168



Von Bestellung bis zur Lieferung können 2 – 3 Werktage vergehen, bitte bestellen Sie also rechtzeitig.



Die Mitarbeiter der Auftragsannahme bei Sysmex Deutschland GmbH in Norderstedt stehen Ihnen werktags von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung.
Telefon: +49 40 534102222

Schritt 2

Blutabnahme und Versand

Nehmen Sie Ihrem Patienten 10 mL venöses Blut ab und verwenden Sie dabei die speziellen Blutentnahmegefäße, die im Schritt 1 bestellt wurden. Verpacken Sie es gemäß der in der Box liegenden Anleitung.

Schritt 3

Wahl des Exzellenzzentrums und Übernachttransportes

Wählen Sie das Exzellenzzentrum für die Analyse Ihrer Probe aus.

Exzellenzzentrum	Kundennr für GO!	Ansprechpartner
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum	12111	PD Dr. Alexander Baraniskin Telefon: +49 234 29980193
Molekulardiagnostisches Labor der medizinischen Fakultät Universitätsklinikum Mannheim	31650	Sekretariat Prof. Neumaier Telefon: +49 621 3832222



Bestellen Sie den Übernachttransport für Ihre Proben
Tel +49 40 23886890 und geben Sie die Kundennummer des Exzellenzzentrums Ihrer Wahl an.

Unser Logistikpartner GO! holt Ihre Probe – für Sie kostenfrei – am selben Tag ab.

Die Ergebnisse bekommen Sie in wenigen Tagen.
Bei Fragen bezüglich Kostenübernahme wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner des Zentrums.