

Das Quidel Triage System



Automatisiert. Kalibriert. Verbunden.
Professionelle Diagnostik am Behandlungsort




Triage®

Das Quidel Triage System

Schnelle quantitative Ergebnisse in ungefähr
15–20 Minuten*


Das Quidel Triage MeterPro wird in tausenden
von Gesundheitseinrichtungen weltweit
eingesetzt. Ein umfassendes Testmenu bietet
die diagnostischen Antworten, die Sie
benötigen, um schnelle, kostenwirksame
Behandlungsentscheidungen am
Behandlungsort fällen zu können.

*mit Ausnahme des TOX Drogen-/Medikamentenschnelltests

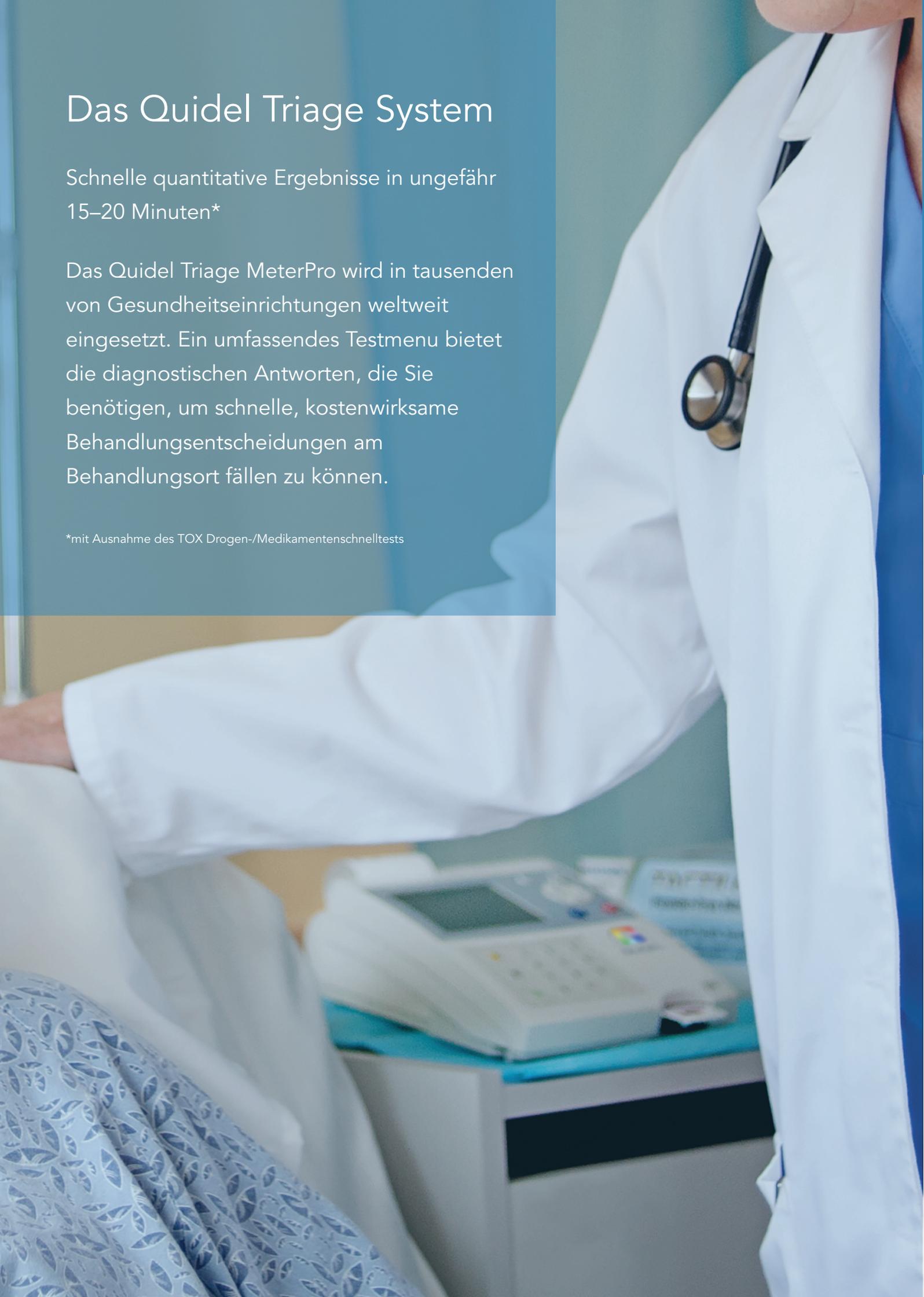


Herz-Kreislauf

Das Quidel Triage System kann die Entscheidungsfindung für die kritischsten Erkrankungen, einschließlich Herzversagen, akutes Koronarsyndrom, Herzinfarkt und thromboembolische Ereignisse beschleunigen.

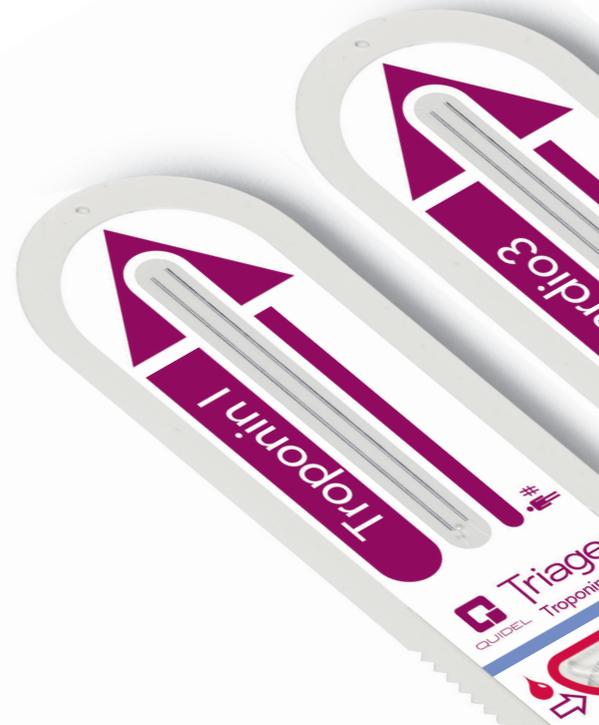

Messbereich						
Test/Panelgerät	Myoglobin	CK-MB	Troponin I	BNP	D-dimer	NT-proBNP
Quidel Triage Cardiac Panel	5–500 ng/ml	1,0–80 ng/ml	0,05–30 ng/ml			
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel	5–500 ng/ml	1,0–80 ng/ml	0,05–30 ng/ml	5–5.000 pg/ml	100–5.000 ng/ml	
Quidel Triage Troponin I Test			0,01–10 ng/ml			
Quidel Triage Cardio2 Panel	0,01–10 ng/ml			5–5.000 pg/ml		
Quidel Triage Cardio3 Panel		1,0–80 ng/ml	0,01–10 ng/ml	5–5.000 pg/ml		
Quidel Triage BNP Test				5–5.000 pg/ml		
Quidel Triage NT-proBNP-Test						20–35.000 pg/ml
Quidel Triage D-Dimer Test					100–5.000 ng/ml	

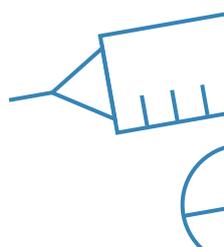



Einfache Testdurchführung

1

Patientenprobe mit der Transferpipette jedem Set zugeben.



Quidel Triage TOX Drogen-/Medikamentenschnelltest

Ein Screening-Test, der den simultanen qualitativen Nachweis von Drogen/Medikamenten und/oder den wichtigsten Metaboliten über einer Schwellenkonzentration von bis zu 10 unterschiedlichen Drogen-/Medikamentenklassen (11 einzigartige Assays) in Urin ermöglicht.

Schwellenkonzentrationen für Drogen-/Medikamenten-Assays

Acetaminophen/Paracetamol	APAP	5 µg/ml
Amphetamine	AMP	1000 ng/ml
Metamphetamine	mAMP	1000 ng/ml
Barbiturate	BAR	300 ng/ml
Benzodiazepine	BZO	300 ng/ml
Kokain	COC	300 ng/ml
Methadon	MTD	300 ng/ml
Opiate	OPI	300 ng/ml
Phencyclidin	PCP	25 ng/ml
THC	THC	50 ng/ml
Trizyklische Antidepressiva	TCA	1000 ng/ml

2

Das Testgerät in das Quidel Triage MeterPro einsetzen.



3

Lesen Sie die Ergebnisse vom Bildschirm ab oder drücken Sie auf „Drucken“ für eine gedruckte Kopie.





Laborqualität mit der Geschwindigkeit am Behandlungsort

- Ergebnisse in 15–20 Minuten.
- Qualitätskontrollen im Messgerät, in der Software und in den Testgeräten eingebaut.
- Chargen-spezifische Assay-Kalibration (via Chargen-spezifisches CODE CHIP™-Modul)
- Externes Qualitätskontrollmaterial verfügbar für Gesamtqualitätssicherung.
- Operatoren-ID und Qualitätskontrollsperrungen.
- Batch-Tests für Patienten mit mehreren Geräten möglich, sofern Testgerät innerhalb von 30 Minuten als zusätzliche Probe verarbeitet wird.
- Vollblut-, Plasma- oder Urinproben.

Einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand

- Erfordert weder spezielle Expertise noch umfangliche Schulung.
- Barcode-Leser für Patienten- und Operatoren-ID.
- Keine Wartung außer Papier- und Batterieersatz sowie periodische Außenreinigung.
- Quantitative diagnostische Panelergebnisse werden in einfach zu lesenden Zahlen angezeigt und gedruckt und zusätzlich hervorgehoben*, wenn das Ergebnis über dem erwarteten Wert liegt.
- Qualitative diagnostische Panelergebnisse werden als positiv (POS) oder negativ (NEG) angezeigt und gedruckt: keine Interpretation von Linien notwendig.

* mit Ausnahme des D-Dimer

Anschlussmöglichkeit über das Quidel Triage Census® Advanced Test Management (ATM)-System

- Umfassende Lösung für Überwachung und Bewirtschaftung des Quidel Triage Systems, liefert Datenberichte, Messgerät- und Operatorenkontrolle und Qualitätskontrollanalyse.
- Flexibles Interfacemodul, das zur Kommunikation mit Systemen von Drittanbietern verwendet werden kann.

Das Quidel Triage System ist dafür konzipiert, rasch und einfach Ergebnisse zu liefern.

- Flexibilität mit anpassbaren Testpanels via die Test Select™-Funktion (Option zur Auswahl von Tests nach Bedarf).
- Eliminiert Subjektivität künstlerischer Interpretation mit objektiven Daten auf einem automatisierten Testsystem, das die Entscheidungsfindung beim Patienten beschleunigt.
- Reduzierter Zeitbedarf bis zum Ergebnis kann zu einer rascheren Patientenversorgung, reduzierter Aufenthaltsdauer und erhöhtem Patientendurchsatz auf der Notaufnahme führen.

Quidel Triage Systemprodukte-Liste

Produkt	Menge	Kat.-Nr.
Tests und Kontrollen		
Quidel Triage Cardiac Panel*	Je 25	97000HSEU
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel*	Je 25	97300EU
Quidel Triage BNP-Test*	Je 25	98000XREU
Quidel Triage D-dimer Test*	Je 25	98100EU
Quidel Triage Total 5 Kontrolle 1	5 Ampullen (5x0,25 ml)	88753
Quidel Triage Total 5 Kontrolle 2	5 Ampullen (5x0,25 ml)	88754
Quidel Triage Troponin I Test*	Je 25	98600EU
Quidel Triage Cardio2 Panel*	Je 25	97500EU
Quidel Triage Cardio3 Panel*	Je 25	97400EU
Quidel Triage Total 3 Kontrolle 1*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	88733
Quidel Triage Total 3 Kontrolle 2*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	88734
Quidel Triage NT-proBNP-Test*	Je 25	98700EU
Quidel Triage NT-proBNP Kontrolle 1*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	98713EU
Quidel Triage NT-proBNP Kontrolle 2*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	98714EU
Quidel Triage TOX Drogen-/Medikamentenschnelltest*	Je 25	94400EU
Quidel Triage TOX Drogen-/Medikamentenschnelltest Kontrolle 1	5 Ampullen (5x0,25 ml)	94413
Quidel Triage TOX Drogen-/Medikamentenschnelltest Kontrolle 2	5 Ampullen (5x0,25 ml)	94414
Instrumente und Zubehör		
Quidel Triage MeterPro	Je 1	55071
Quidel Triage MeterPro Barcode-Scanner	Je 1	52142
Quidel Triage MeterPro Y-Adapter	Je 1	52098
Quidel Triage Druckerpapier	Je 1	52031
Quidel Triage Supervisor Codechip	Je 1	80035
Quidel Triage Census Daten-Management Software	Kit	55069

*In den USA nicht erhältlich