

Super ID™

Der Maßstab für zuverlässige
Sofortdiagnostik



Schnelligkeit und Kosteneffizienz

Der Super ID™ ist ein kosteneffizienter Analyser, der die Vorteile der patientennahen Sofortdiagnostik mit einer hohen Präzision und Spezifität für alle applizierten Tests verbindet.

Speziell auf die Bedürfnisse von Praxislaboren ausgelegt, erfüllt der Super ID™ zuverlässig Ihre höchsten Ansprüche an Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Durch seine hohe Kalibrationsstabilität und seine permanente Einsatzbereitschaft steht Ihnen mit dem Super ID™ der Maßstab für zuverlässiges Point-of-Care zur Verfügung.

Die Autokalibration wird über eine zu jedem Reagenzkit mitgelieferte Chipkarte ausgeführt. So ist der Super ID™ jederzeit einsetzbar. Das System liefert für Ihre Diagnose präzise Ergebnisse nach kurzer Zeit direkt in der Praxis, eine aufwendige Probenvorbereitung entfällt. Somit ist durch den Super ID™ eine unmittelbare und zielgerichtete Behandlung möglich.

Aufgrund der Verwendung von kostengünstigen Liquidreagenzien sowie durch ein umfassendes Dienstleistungspaket unterstützt der Super ID™ eine optimale Wirtschaftlichkeit und ein problemfreies Arbeiten in Ihrer Praxis.

Zu den Leistungsvorteilen Präzision, Vielseitigkeit, Schnelligkeit und Kosteneffizienz ist der Super ID™ zusätzlich klein und kompakt gebaut sowie intuitiv zu bedienen.



Präzision und Vielseitigkeit, gepaart mit einfacher Handhabung

So einfach wie 1 – 2 – 3



1. Einfach die Kapillare bis zur zweiten schwarzen Markierung füllen. Es entfallen Vorbereitungszeit, Probenvorbehandlung und Mitarbeitertraining am Gerät.



2. Kapillare an der Sollbruchstelle abbrechen, in den Probenbecher geben und gut schütteln.



3. Probenbecher und Reagenzriegel in die Probenkassette setzen – fertig.

Grundlage für die präzisen Ergebnisse des Super ID™ in Laborqualität ist das hochspezifische, immunturbidimetrische Messprinzip, bei dem die jeweilig zu messenden Werte in einem Analyseschritt direkt ermittelt werden. Zudem werden Reagenzien verwendet, die auch in großen Laborsystemen eingesetzt werden. Aus diesem Grund sind die quantitativen Ergebnisse des Super ID™ vielfach präziser als die Ergebnisse anderer Analyser.

Für gleichbleibend hohe Qualität sorgt die Automation von Verdünnung, Mischung, Inkubation und Messung. Dazu trägt auch der Einsatz von Reagenzien im Unit-use-Verfahren sowie die hohe Kalibrationsstabilität und die Autokalibrierung bei.



Super ID™



Präzise Messergebnisse

- Testbestimmung in Laborqualität
- Immunturbidimetrisches Messprinzip
- Ergebnisse in kurzer Zeit

Einfache Handhabung

- Nur 10 µL Vollblut
- Immer korrekte Probenmenge durch Open-End-Kapillare
- Automatische Reagenzerkennung durch Barcode

Ihr Vorteil

- Kostengünstige Bestimmung
- Wartungsarm
- Permanente Einsatzbereitschaft

Fakten und technische Details

Probenmaterial	Vollblut
Probenmenge	10 µL
Messeinheit	Spektralphotometer
Messbereich	4 – 14 % oder 20,22 mmol/mol – 129,5 mmol/mol
Messprinzip	Immunturbidimetrie
Messdauer	parameterabhängig
Reagenzien	Liquidreagenzriegel zum einmaligen Gebrauch (Unit-use)
Display	Touchscreen/Farbdisplay
Handhabung	1 Arbeitsschritt
Schnittstelle	RS-232C
Kalibration	automatisiert
Zubehör optional	Drucker DPU 414, Barcode-Reader
Betriebsspannung	12 V (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
Gewicht	4 kg
Maße (B x H x T)	200 x 170 x 150 mm

Patientennahe
Labordiagnostik
mit Herz



Online bestellen unter
www.hitado.de

Änderungen des Designs sowie Spezifikationsänderungen basierend auf fortschreitender Produktentwicklung behalten wir uns vor. Solche Änderungen werden bei Neuauflagenerscheinungen bestätigt und anhand des neuen Ausstellungsdatums verifiziert.

Vertrieb Deutschland: Hitado GmbH
Dreihäuser 2, 59519 Möhnese, Deutschland · Telefon +49 2924 9705-0 · Fax +49 2924 9705-31 · info@hitado.de · www.hitado.de

Vertrieb Österreich: Sysmex Austria GmbH
Odoakergasse 34-36, 1160 Wien, Österreich · Telefon +43 1 4861631 · Fax +43 1 4861631-25 · office@sysmex.at · www.sysmex.at

Hersteller: Dr. Müller
Burgker Straße 133, 01705 Freital, Deutschland