


Sentimag® – Magseed®


Perfekte Orientierung von der Platzierung bis zur Lokalisierung




Merkmale des magnetischen Markersystems Magseed®

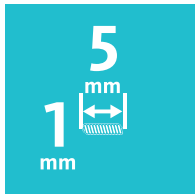

Kompakte Größe

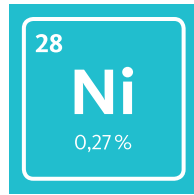

Medizinischer Edelstahl/
niedriger Nickelgehalt

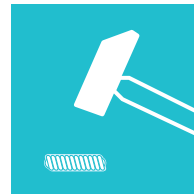

Robust



Bracketing: Marker
im Abstand von
20 mm oder mehr



Fester Sitz




Keine Radioaktivität; keine
Abschwächung des Signals
mit der Zeit



Langzeit-
Implantation



Sichtbar im US

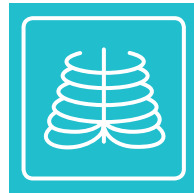

Sichtbar im Röntgen




Bedingt MR-sicher (1,5/3,0 T)


- MRT unmittelbar nach der Platzierung möglich
- Minimale Erwärmung oder Bewegung des Markers
- Temperaturerhöhung um <math>< 5,3\text{ }^\circ\text{C}</math> nach 15 Minuten Dauerscan



Standard-Injektions-
system, gebrauchsfertig mit Magseed®

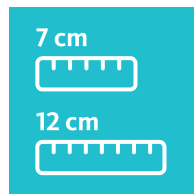

Nadeln mit 1 cm
Referenzmarkierungen
für die Einstichtiefe

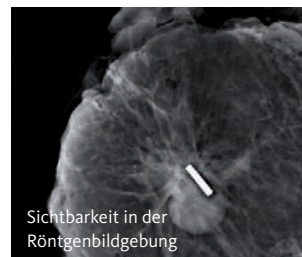

Sichtbarkeit in der
Röntgenbildgebung



Sichtbarkeit im Ultraschall

- Nadeln: 7 cm (SM18-1-07) und 12 cm (SM18-1-12)
- Das Standard-Injektionssystem ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- Mit Ethylenoxid sterilisiert
- Magseed® ist speziell auf eine optimale Detektion in der magnetischen Suszeptometrie mit dem Sentimag®-System ausgelegt
- Sentimag® und Magseed® verfügen über die Zulassung der FDA und die CE-Kennzeichnung für Langzeit-Implantation und Lokalisierung von Weichgewebe



Weitere Informationen sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

Endomag®, Sentimag® und Magseed® sind eingetragene Europäische Unionsmarken der Endomagnetics Ltd. · www.endomag.com

Vertrieb Deutschland: Sysmex Deutschland GmbH Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Deutschland · Telefon +49 40 534102-0 · Fax +49 40 5232302 · info@sysmex.de · www.sysmex.de

Vertrieb Schweiz: Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Schweiz · Telefon +41 44 718 38 38 · info@sysmex.ch · www.sysmex.ch

Vertrieb Österreich: Sysmex Austria GmbH Lienfeldergasse 31-33, 1160 Wien, Österreich · Telefon +43 1 4861631 · Fax +43 1 486163125 · office@sysmex.at · www.sysmex.at

Vertrieb EMEA: Sysmex Europe GmbH Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Deutschland · Telefon +49 40 52726-0 · Fax +49 40 52726-100 · oncology@sysmex-europe.com · www.sysmex-europe.com

Hersteller: Endomagnetics Ltd The Jeffreys Building, St John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, Großbritannien

Die für Ihre Region zuständige Sysmex Niederlassung finden Sie unter www.sysmex-europe.com/contacts