

# CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test



COVID-19 Antigen Test für die  
Eigenanwendung  
Mehr Sicherheit für Ihr Team

## Vorteile auf einen Blick

- ✓ Keine Ausrüstung oder professionelle Schulung erforderlich
- ✓ Einfache Probenentnahme aus dem vorderen Nasenbereich
- ✓ Nur 15 Minuten bis zum Testergebnis
- ✓ Sensitivität von 97,3 % und Spezifität von 100 %



# Der Ausbreitung des Virus einen Schritt voraus – durch einen einfachen Selbsttest


Die Erkennung infizierter COVID-19 Patienten ist für die Eindämmung und Verhinderung der Ausbreitung der Erkrankung von hoher Bedeutung. Mit dem CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test ist sehr schnell erkennbar, ob eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt.

Der CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test von Siemens Healthineers ist einfach durchzuführen und liefert schnelle Ergebnisse mittels Abstrich aus dem vorderen Teil

der Nase. Laborgeräte oder spezialisiertes Laborpersonal sind zur Durchführung nicht erforderlich. Bereits innerhalb von 15 Minuten wird ein positives oder negatives Ergebnis deutlich sichtbar.

Als Teil einer umfassenderen Strategie kann der CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test einen wichtigen Beitrag dazu leisten, der Ausbreitung des Virus schnell und einfach gegen zu wirken.


## Einfach durchzuführendes Testverfahren für die Eigenanwendung

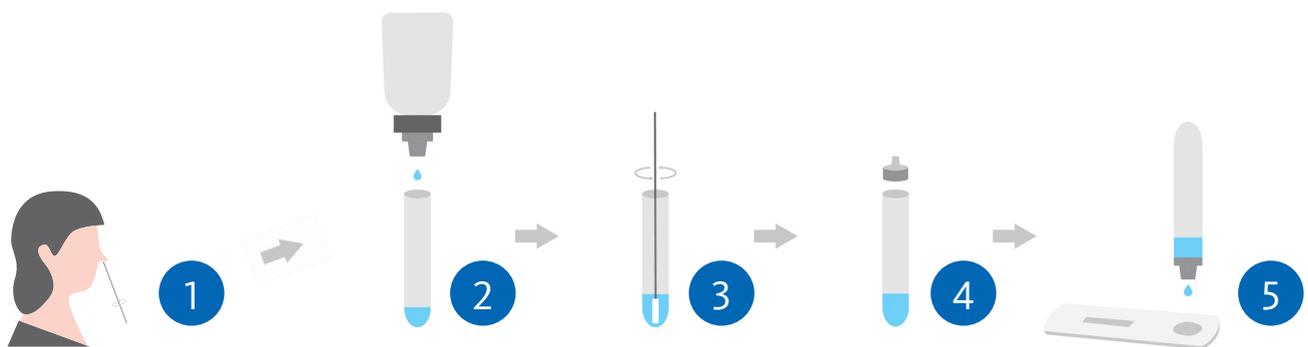

- ✓ Bringen Sie die Probe und die Testkomponenten auf Raumtemperatur (15–30 °C).
- ✓ Die saugfähige Spitze des Abstrichtupfers in den vorderen Nasenbereich einführen (2–4 cm tief). Aus beiden Nasenlöchern jeweils mindestens fünfmal mit einer Rollbewegung Probenmaterial entnehmen.
- ✓ 10 Tropfen (ca. 300 µl) Pufferlösung in das aufrecht positionierte Extraktionsröhrchen geben (mitgelieferten Ständer verwenden).
- ✓ Den Tupfer mindestens sechsmal in dem Röhrchen drehen, gegen die Innenwand des Röhrchens drücken, eine Minute stehen lassen und dann noch mehrmals andrücken.
- ✓ Den Tupfer sicher entnehmen, entsorgen und die Tropfkappe in das Röhrchen mit der Probe einsetzen.
- ✓ Testkassette flach hinlegen und vier Tropfen (ca. 100 µl) der zu testenden Probe in die Vertiefung geben. Ergebnis nach 15 Minuten ablesen.

Nach dem Gebrauch sollten die Materialien im Haus- oder Restmüll entsorgt werden. Nach Ablauf des Verfalldatums sollte das Testkit nicht mehr verwendet werden.

### Mögliche Ergebnisse

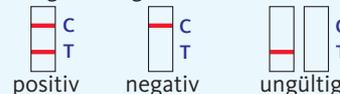

### Produktinformationen

Testdauer	15 Minuten
Probentyp	Nasenabstrich
Lagerung	bei Raumtemperatur oder gekühlt (2-30 °C)
Haltbarkeit	24 Monate ab Werk
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 20 Testkassetten</li><li>✓ 2 Fläschchen Extraktionspuffer</li><li>✓ 20 sterile Abstrichtupfer</li><li>✓ 20 Extraktionsröhrchen und Kappen</li><li>✓ 1 Ständer</li><li>✓ 1 Beipackzettel</li></ul>
Artikelnr.	11556018